

РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ АПАРАТА **BINARY PREMIUM**

56 АКТУАЛЬНИХ КЕЙСІВ



Система BINARY PREMIUM – це інноваційне поєднання естетичних і терапевтичних методів відновлення пошкоджених тканин і тону м'язів за одну процедуру.

Це можливо завдяки поєднанню резистивної діатермії, емнісної діатермії та електростимуляції.

У цій презентації показано 56 результатів проведення процедур для різних пацієнтів, проведених фахівцями в галузі естетичної медицини. Ми дякуємо вам за можливість поділитися своїми результатами.

Marketing Department of RÖS'S Estética

ВИСОКОЕФЕКТИВНО • БЕЗПЕЧНО • ПРИБУТКОВО



ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	4
ОПИС	–
ПРОВІДИВ	Estética Patricia Juez, Madrid



ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	6
ОПИС	Програма для підтяжки шкіри обличчя. Відновлююча процедура для зрілої шкіри. Ємнісна діатермія, 24 хвилини. Резистивна діатермія, 8 хвилин. Електроліфтинг, 18 хвилин.
ПРОВОДИВ	Centre d'Estètica i Imatge Pepi Díaz, Castelldefels, Barcelona



До

7
процедур14
процедур

Після

ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	14
ОПИС	Програма для підтяжки обличчя. Ємнісна діатермія, 30 хвилин. Резистивна діатермія, 10 хвилин.
ПРОВОДИВ	Centro Gloria, Barcelona



ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	1
ОПИС	Режим вільного програмування. Процедура для зміцнення та ревіталізації орбітальної зони. Ємнісна діатермія, 15 хвилин. Резистивна діатермія, 6 хвилин.
ПРОВОДИВ	Janda Beauty, Barcelona



ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	1
ОПИС	Режим вільного програмування. Процедура для зміцнення підборіддя.



ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	1
ОПИС	Програма по усуненню мімічних зморшок. Інтенсивний догляд за верхньою частиною обличчя. Ємнісна діатермія, 20 хвилин. Резистивна діатермія, 20 хвилин.
ПРОВІДИВ	Centre d'Estètica i Imatge Pepi Díaz, Castelldefels, Barcelona



До




Після



ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	3
ОПИС	Чудовий результат інтенсивної локальної орбітальної підтяжки. Ємнісна діатермія, 12 хвилин. Резистивна діатермія, 6 хвилин. Електроліфтинг, 12 хвилин.
ПРОВОДИВ	Estética Carmen Villasante, Valencia



ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	8
ОПИС	–
ПРОВОДИВ	Ana Iruela, Anna Centre Estètica, Palafrugell, Girona

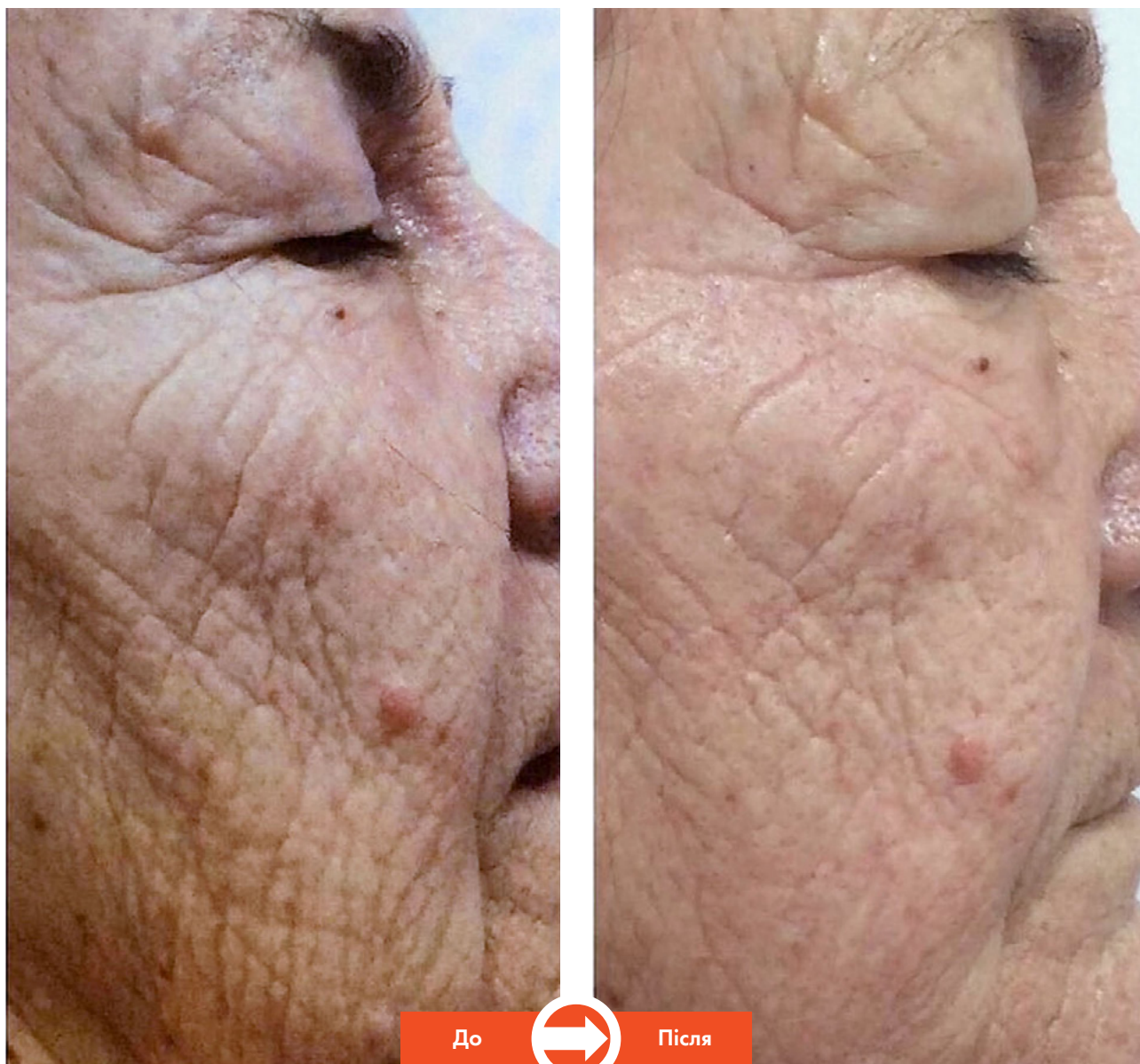

ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	6
ОПИС	–
ПРОВІДИВ	Iris Palencia, Labay Estética, Barcelona



ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	3
ОПИС	–
ПРОВОДИВ	Ana Iruela, Anna Centre Estètica, Palafrugell, Girona



До



Після



До



Після


ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	10
ОПИС	—
ПРОВОДИВ	Mercedes Herranz, Estética MHM, Madrid



ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	6
ОПИС	—
ПРОВОДИВ	Mercedes Herranz, Estética MHM, Madrid



ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	1
ОПИС	Демонстраційний сеанс на повіках.
ПРОВОДИВ	RÖS'S Training Department, Castelldefels, Barcelona

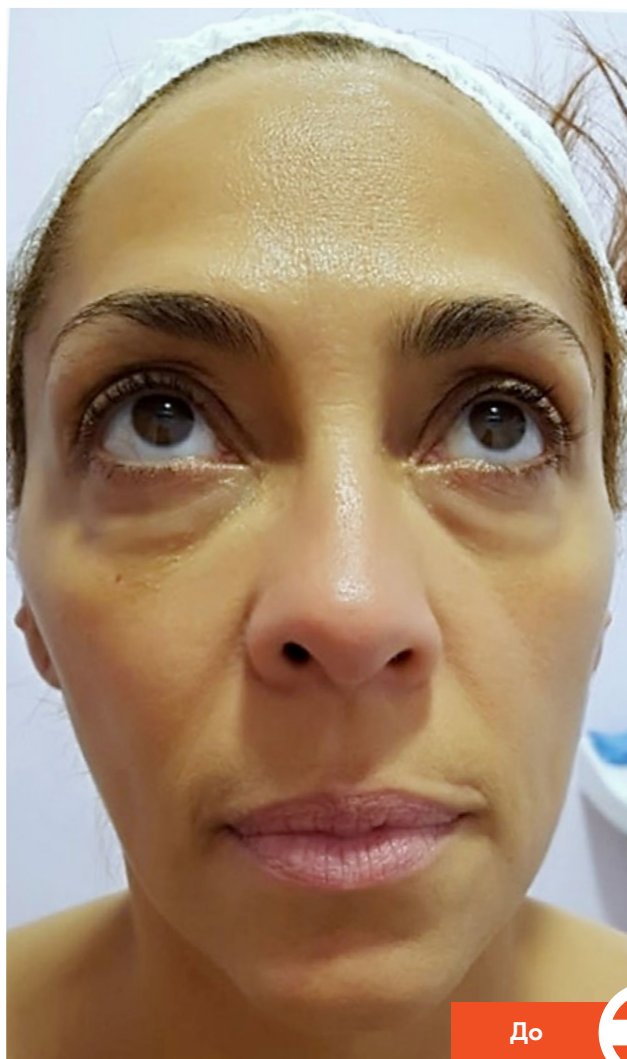

До



Після



ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	6
ОПИС	Інтенсивна програма для верхньої частини обличчя. Інтенсивне лікування мішків під очима.
ПРОВІДИВ	Mercedes Herranz, Estética MHM, Madrid



До



Після

ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	1
ОПИС	Інтенсивна програма для верхньої частини обличчя. Лікування мішків під очима. Ємнісна діатермія, 15 хвилин. Резистивна діатермія, 6 хвилин. Електроліфтинг, 12 хвилин.
ПРОВОДИВ	Lidia Rodríguez Estética Avanzada, Guissona, Lleida



ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	4
ОПИС	Інтенсивна програма для верхньої частини обличчя. Специфічна обробка орбітальної зони. Ємнісна діатермія, 12 хвилин. Резистивна діатермія, 6 хвилин. Електроліфтинг, 12 хвилин.
ПРОВІДИВ	Beauty centre at Las Palmas



До



Після


ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	17
ОПИС	–
ПРОВОДИВ	Ana Iruela, Anna Centre Estètica, Palafrugell, Girona



ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	6
ОПИС	Інтенсивна програма для верхньої частини обличчя. Верхнє ліве зображення – до початку процедур. Верхнє праве – після 3-го сеансу. Зображення нижнє – після 6-го сеансу.
ПРОВОДИВ	Mercedes Herranz, Estética MHM, Madrid





До

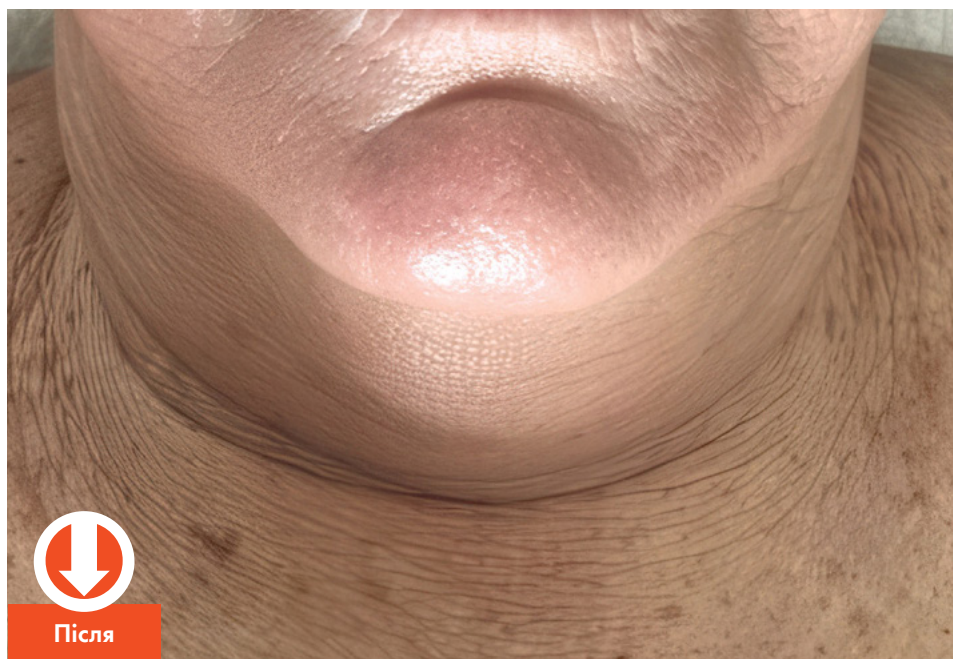

Після

ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	4
ОПИС	Інтенсивна програма для нижньої частини обличчя. Обробка подвійного підборіддя. Ємнісна діатермія, 12 хвилин. Резистивна діатермія, 6 хвилин. Електроліфтинг, 12 хвилин.
ПРОВОДИВ	RÖS'S Training Department, Castelldefels, Barcelona

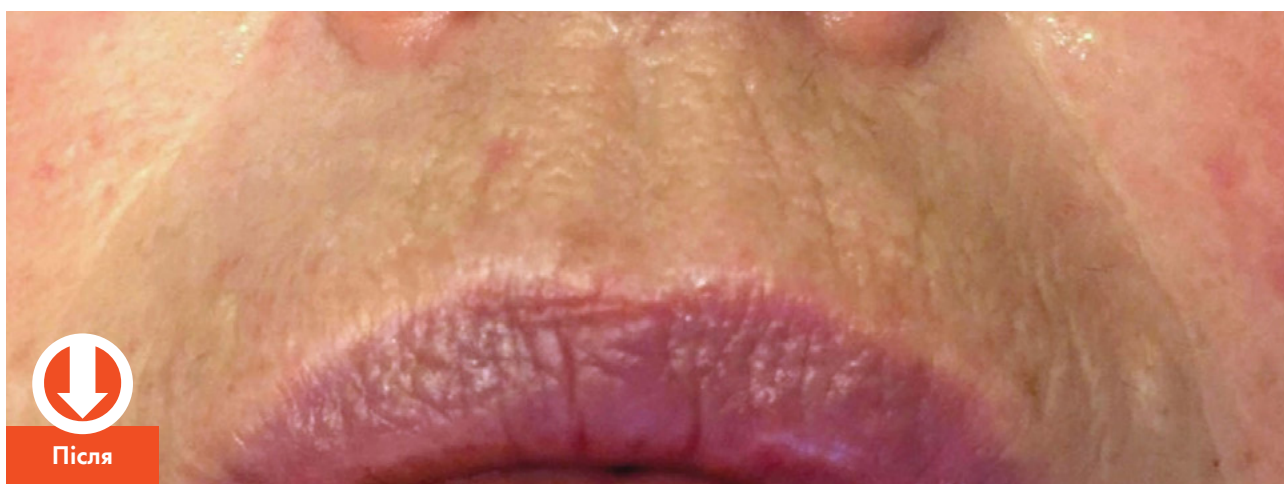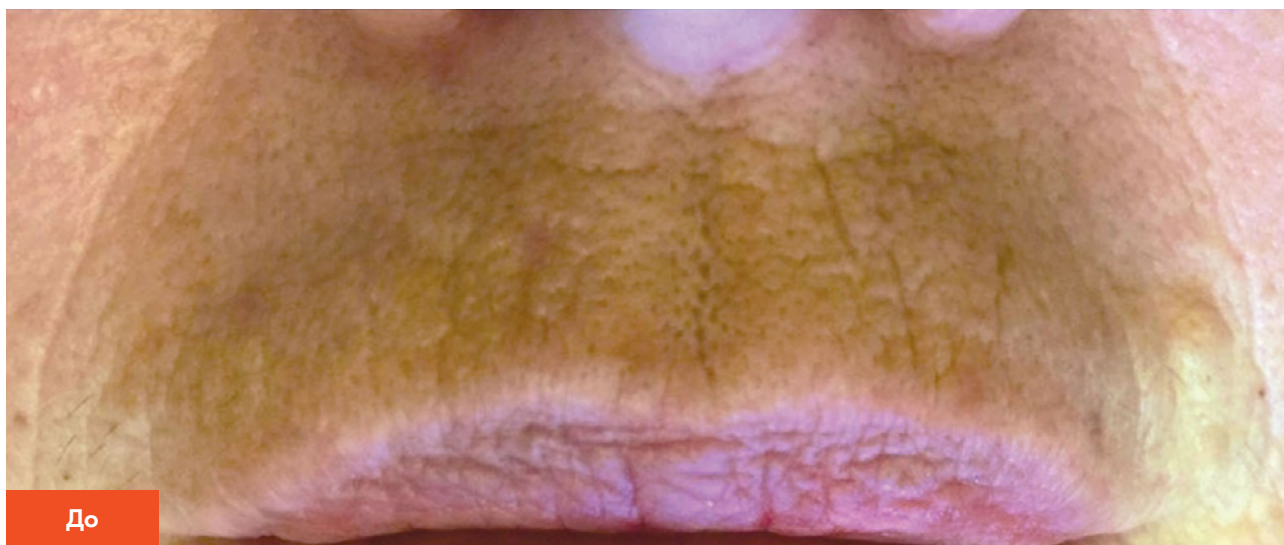

ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	1
ОПИС	Середня інтенсивна програма для обличчя. Процедура для зміцнення верхньої губи. Ємнісна діатермія, 14 хвилин. Резистивна діатермія, 6 хвилин. Електроліфтинг, 10 хвилин.
ПРОВОДИВ	RÖS'S Training Department, Castelldefels, Barcelona




До



Після

ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	6
ОПИС	Вік клієнтки: 71 рік. Інтенсивна програма для нижньої частини обличчя. Процедура для підтяжки шиї та декольте. Ємнісна діатермія, 12 хвилин. Резистивна діатермія, 6 хвилин.
ПРОВОДИВ	Centro Maria Miró Estética Natural, Barcelona

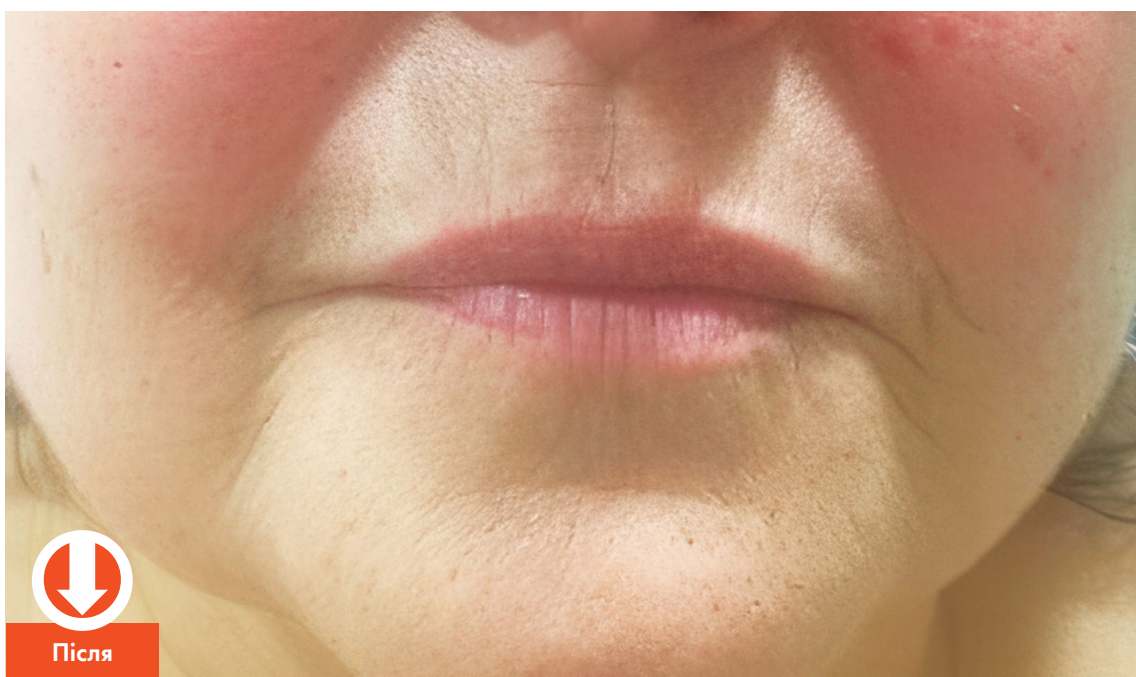

ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	5
ОПИС	Інтенсивна програма для нижньої частини обличчя. Ємнісна діатермія, 14 хвилин. Резистивна діатермія, 6 хвилин. Електроліфтинг, 10 хвилин.
ПРОВОДИВ	Estética Essence, Roses, Girona



ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	8
ОПИС	Перші 6 процедур з електроліполізом. Останні 2 з локалізованим жиром, але зі зміною електроліполізу на електростимуляцію.
ПРОВОДИВ	Miriam Martínez, Miscuidado2, Paterna, Valencia



ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	15
ОПИС	Зменшення живота.
ПРОВОДИВ	Iris Palencia, Labay Estética, Barcelona



До



Після



ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	5
ОПИС	–
ПРОВОДИВ	Cristina Sesé, La Pobla de Vallbona, Valencia



ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	12
ОПИС	Програма редукції фігури. Лікування локального ожиріння (комбінований протокол з пресотерапією). Ємнісна діатермія, 10 хвилин. Резистивна діатермія, 16 хвилин. Електростимуляція, 24 хвилини.
ПРОВОДИВ	Centre d'Estètica i Imatge Pepi Díaz, Castelldefels, Barcelona



ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	10
ОПИС	Комбінація програм. Лікування: м'який целюліт, зміцнення та зменшення об'ємів. Діатермія та електростимуляція.
ПРОВІДИВ	Cristina Sesé, La Pobla de Vallbona, Valencia



ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	8
ОПИС	Втрата об'єму на 10 см.
ПРОВОДИВ	Sonia Solís, Stetic Moià, Moià, Barcelona





До



Після

ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	5
ОПИС	Антицелюлітна програма. Лікування набрякового целюліту. Ємнісна діатермія, 28 хвилин. Резистивна діатермія, 12 хвилин.
ПРОВОДИВ	El Salón de Patri, Coín, Málaga

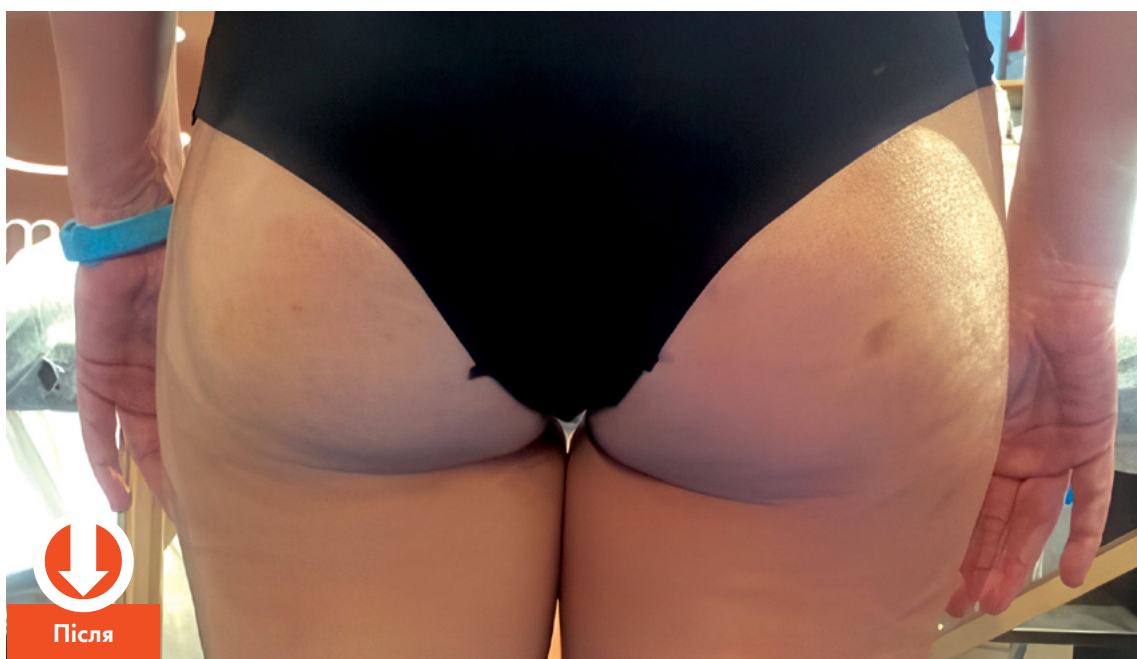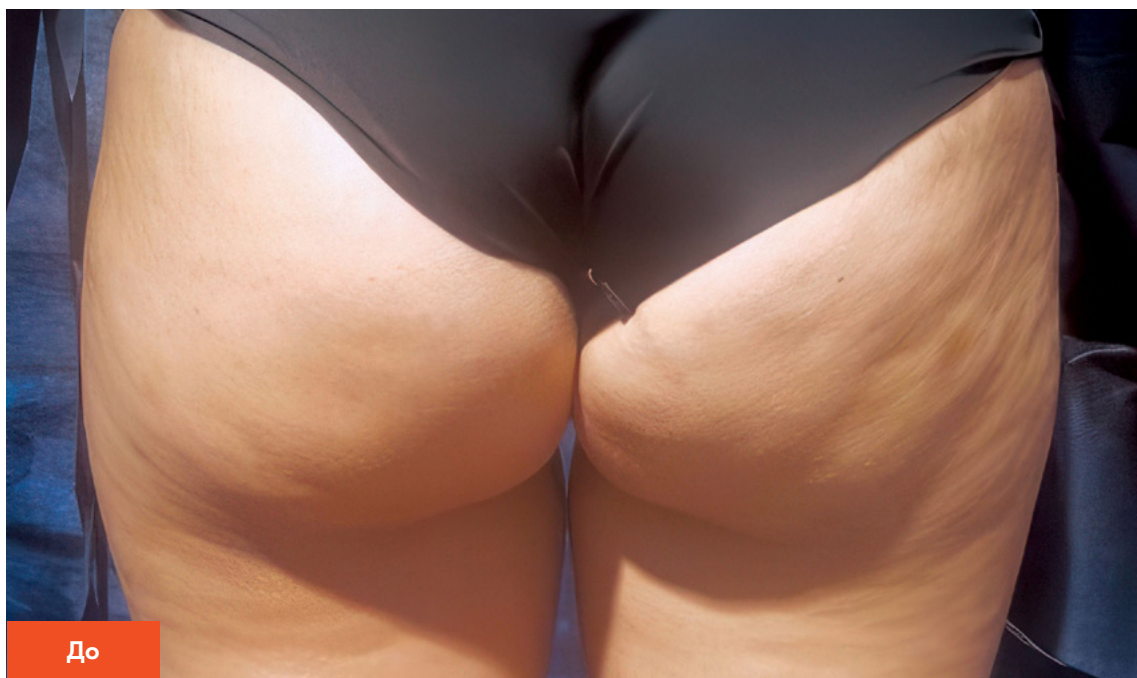

ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	8
ОПИС	Антицелюлітна програма. Лікування набрякового целюліту. Ємнісна діатермія, 28 хвилин. Резистивна діатермія, 12 хвилин. Електростимуляція, 20 хвилин
ПРОВІДИВ	RÖS'S Training Department, Castelldefels, Barcelona




ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	6
ОПИС	Програма зміцнення. Інтенсивна обробка живота. Ємнісна діатермія, 20 хвилин. Резистивна діатермія, 10 хвилин. Електростимуляція, 20 хвилин.
ПРОВОДИВ	Centro Mevis, Platja d'Aro, Girona



ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	2
ОПИС	Зміцнююча програма. Процедура для зміцнення живота. Ємнісна діатермія, 26 хвилин. Резистивна діатермія, 14 хвилин. Електростимуляція, 20 хвилин.
ПРОВОДИВ	Lidia Rodríguez Estética Avanzada, Guissona, Lleida



ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	14
ОПИС	Режим вільного програмування. Редуктивне лікування. Ємнісна діатермія, 26 хвилин. Резистивна діатермія, 14 хвилин. Електростимуляція, 20 хвилин.
ПРОВОДИВ	Cuarzo Santander, Santander, Cantabria

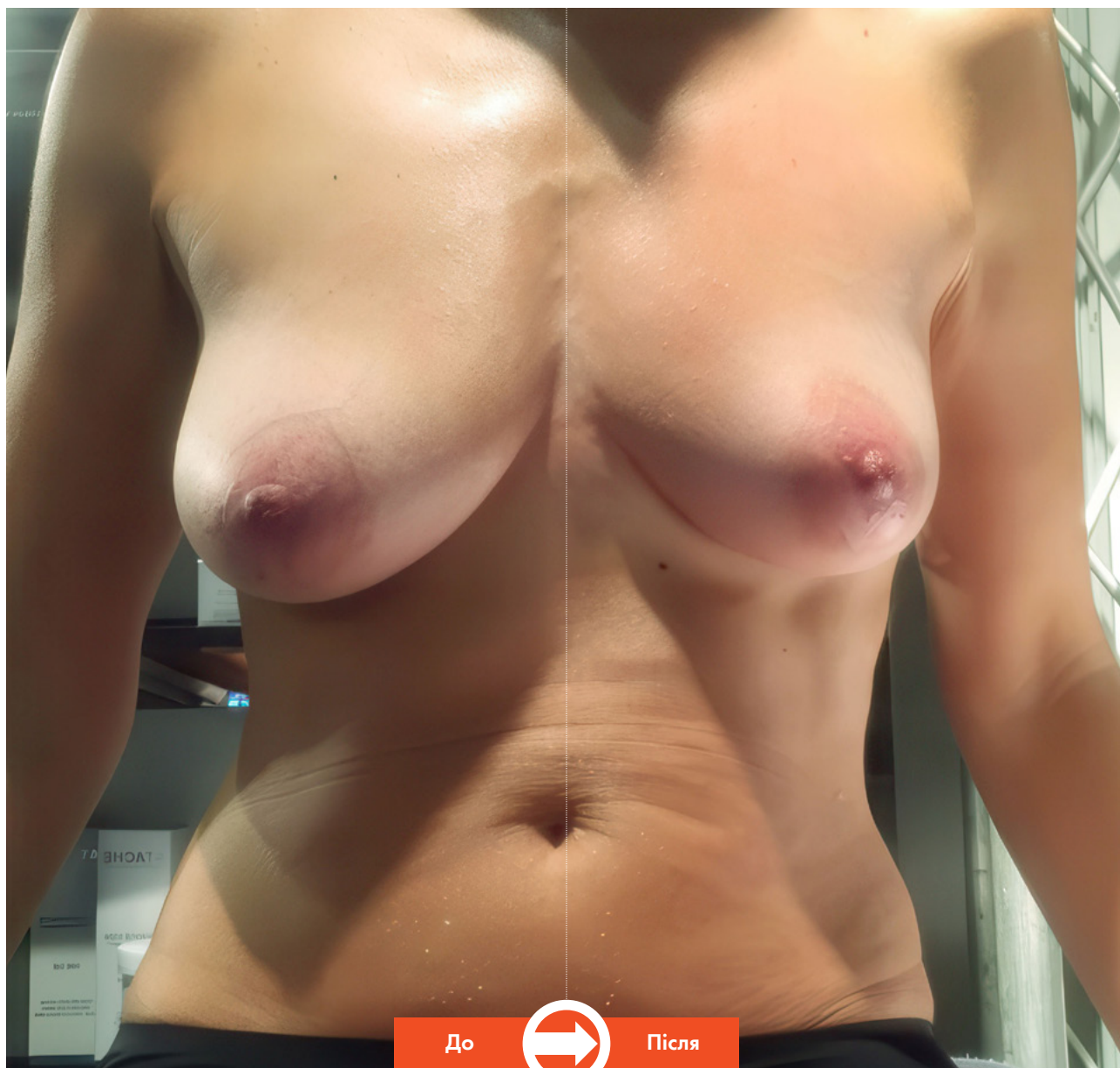

ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	1 (demo)
ОПИС	Режим вільного програмування. Ємнісна діатермія, 26 хвилин. Резистивна діатермія, 14 хвилин. Електростимуляція самоклеючими електродами, 20 хвилин.
ПРОВІДИВ	Centro Alquimia, Castellbisbal, Barcelona



ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	2
ОПИС	Режим вільного програмування. Зміцнююча процедура. Ємнісна діатермія, 15 хвилин. Резистивна діатермія, 20 хвилин.
ПРОВІДИВ	Centro Alquimia, Castellbisbal, Barcelona



До




Після



ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	4
ОПИС	Режим вільного програмування. Зміцнююча процедура. Ємнісна діатермія, 10 хвилин. Резистивна діатермія, 20 хвилин. Електростимуляція, 20 хвилин.
ПРОВІДИВ	Naiu Estetika, Pasaia-Trintxerpe, Guipuzcoa



ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	9
ОПИС	–
ПРОВІДИВ	Ana Iruela, Centro médico estético Amano, Jumilla, Murcia

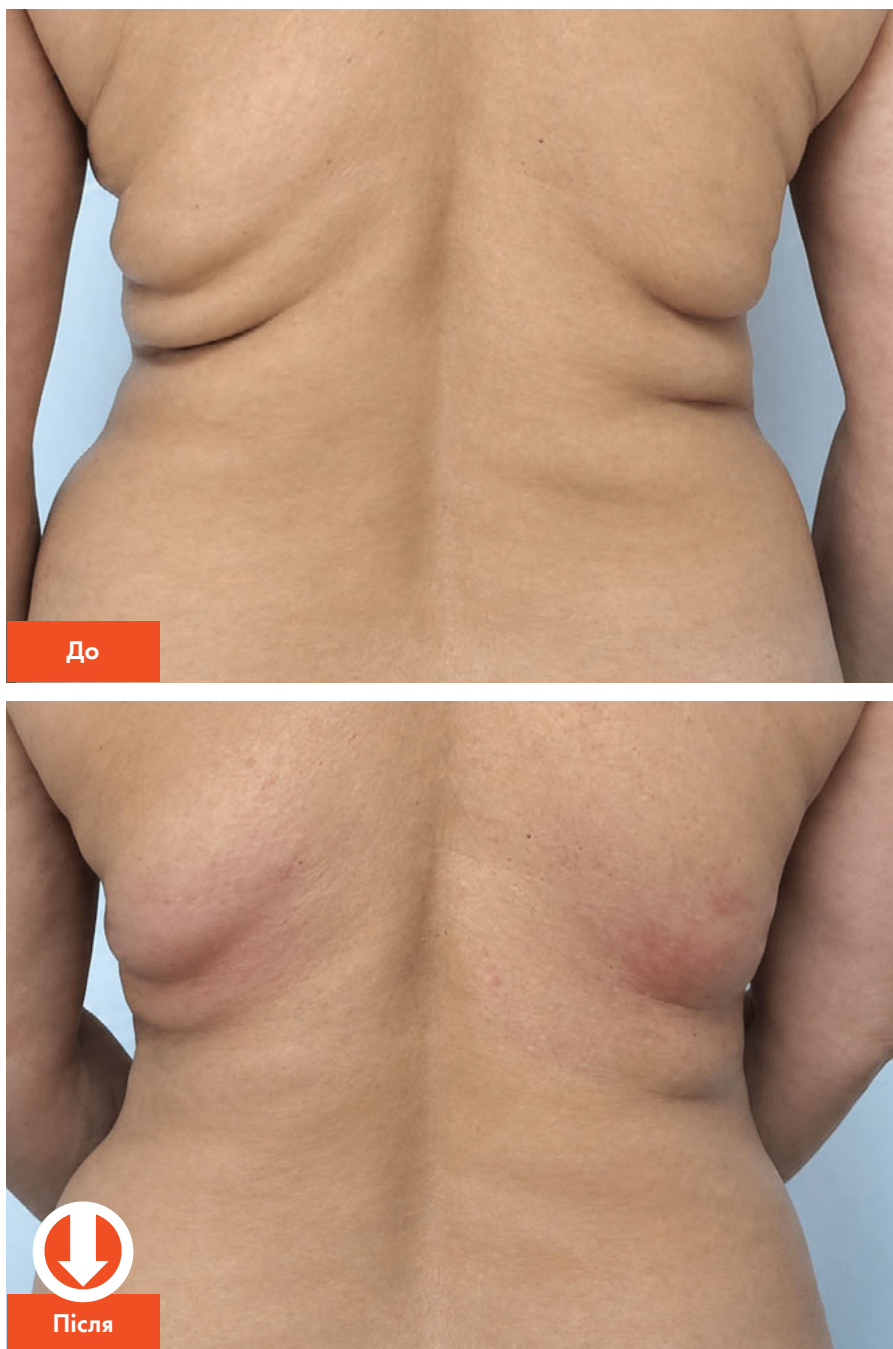

ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	4
ОПИС	Ємнісна діатермія, 26 хвилин. Резистивна діатермія, 14 хвилин. Електростимуляція, 20 хвилин.
ПРОВОДИВ	Centro Estética Lourdes Muñoz, Cerdanyola, Barcelona



До



Після

ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	6
ОПИС	Відновлення шкіри. Розтяжки. Тільки ємнісна діатермія – 25 хвилин за 1 процедуру
ПРОВОДИВ	Centro Alquimia, Castellbisbal, Barcelona



До



Після



ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	20
ОПИС	Тільки ємнісна діатермія. Щоденні сеанси.
ПРОВОДИВ	Mercedes Herranz, Estética MHM, Madrid



До



Після



ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	6
ОПИС	Тільки діатермія. Перші 2 процедури по 10%. Наступні 4 процедури по 20%.
ПРОВІДИВ	Montse Godall, Mandala, Barcelona





До



Після

ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	4
ОПИС	Перші 2 процедури. Ємнісний дренаж, 10 хвилин. Непрямий резистивний, 8 хвилин. Останні 2 процедури. Ємнісний, 10 хвилин. Резистивний, 8 хвилин
ПРОВОДИВ	Centro Alquimia, Castellbisbal, Barcelona



ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	5
ОПИС	Перші 3 процедури. Ємнісна діатермія, 30 хвилин. Потужність: 40%-45%. Останні 2 процедури. Ємнісна діатермія, 20 хвилин. Потужність: 40%-45%. Резистивна діатермія, 10 хвилин. Потужність: 20%-30%.
ПРОВОДИВ	Centro Selma Gulli, Portugal



До



Після



ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	7
ОПИС	Перші 3 процедури. Ємнісна діатермія, 7 хвилин. Резистивна діатермія, 7 хвилин (непряме та пряме застосування). Наступні 4 процедури. Ємнісна діатермія, 10 хвилин. Резистивна діатермія, 8 хвилин.
ПРОВОДИВ	Centro Alquimia, Castellbisbal, Barcelona



До



Після



ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	7
ОПИС	Укус собаки. Мета – зменшити запалення, набряк і прискорити загоєння. Зі швами – атермальний режим і периферичний контакт. Ємнісний, 12 хвилин. Резистивний, 8 хвилин. Після зняття швів – термічний або гіпертермічний режим і прямий контакт. Ємнісний, 8 хвилин. Резистивний, 12 хвилин.
ПРОВОДИВ	Centro Alquimia, Castellbisbal, Barcelona



До



Після



ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	4
ОПИС	Відновлення шкіри після опіків кислотного пілінгу. Перші сеанси в непрямому тепловому режимі. Підвищення температури в міру відновлення шкіри. Щоденні сеанси.
ПРОВОДИВ	Centro Carolina Flores, Las Palmas, Canarias



ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	2
ОПИС	Гематома та набряк від підтяжки нитками. Основна мета - усунення набряку. Ємнісний, 10 хвилин. Резистивний, 10 хвилин
ПРОВОДИВ	Centro Alquimia, Castellbisbal, Barcelona



До



Після

ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	8
ОПИС	У перший сеанс тільки гігієна обличчя. Наступні 4 сеанси, після очищення і тонізації, 20 хвилин ємнісного (по 10 хвилин з кожного боку) в атермальному режимі і 6 хвилин резистивного в непрямому нанесенні. Далі: активний принцип з дренажем і маскою. В останні 3 сеанси працюємо в тепловому режимі на регенерацію тканин.
ПРОВІДИВ	Isabel Ballesteros, Int. Estètic i CTR Benestar Gemma, Barcelona



ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	1
ОПИС	Відновлення шкіри після опіку другого ступеня. Незавершений протокол. Дивовижний результат лише після одного сеансу
ПРОВОДИВ	Centro Stetic's Moià, Moià, Barcelona



До



Після

ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	8
ОПИС	Недавні розтяжки. Лікування для відновлення шкіри. Ємнісна та резистивна діатермія.
ПРОВОДИВ	Centro Ana Climent, Amposta, Barcelona



До



Після



ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	6
ОПИС	Лікування келоїдів.
ПРОВІДИВ	Centro Vanesa Molina, Valencia



До



Після

ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	6
ОПИС	1 процедура: 10 хвилин ємнісного режиму тільки навколо пошкодженої ділянки і 10 хвилин резистивного в термічному режимі. 2 процедура: 10 хвилин ємнісного впливу на пошкоджену ділянку при потужності 10%-15% і 10 хвилин резистивного впливу в тепловому режимі. 3 процедура і далі: 10 хвилин ємнісного до 25% потужності та 10 хвилин резистивного в атермальному режимі.
ПРОВОДИВ	Centre d'Estetica i Imatge Pepi Díaz, Castelldefels, Barcelona



До



Після

ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	5
ОПИС	Мастопексія (підтяжка грудей) без імплантату. Перша процедура: Через сильний біль застосовували лише резистивну діатермію в атермічному режимі та непряму аплікацію протягом 10 хвилин. Наступні процедури: Ємнісний, 15 хвилин. Резистивний, 5 хвилин. Під наглядом лікаря.
ПРОВІДИВ	Centro Alquimia, Castellbisbal, Barcelona



ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	5
ОПИС	Відновлення рухливості руки після розриву сухожилля. Перший сеанс (передпліччя). Ємнісний, 12 хвилин. Резистивний, 8 хвилин. 4 останні сеанси (кисть). Ємнісний, 8 хвилин. Резистивний, 12 хвилин. ПРАЦЮВАТИ В КОМПЛЕКСІ З ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНОЮ РЕАБІЛІТАЦІЄЮ. РЕКОМЕНДОВАНИЙ МЕДИЧНИЙ НАГЛЯД.
ПРОВОДИВ	Centro Alquimia, Castellbisbal, Barcelona



До



Після



ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	3
ОПИС	Усунення гематом та синців після ДТП (діагностика політравми). Мультидисциплінарна робота. Обличчя. Ємнісний, 10 хвилин. Спина та шия. Ємнісний, 20 хвилин. Резистивний, 10 хвилин. Як тільки набряк зменшиться. Ємнісний, 15 хвилин. Резистивний, 15 хвилин. РЕКОМЕНДОВАНИЙ МЕДИЧНИЙ НАГЛЯД
ПРОВОДИВ	Centro Alquimia, Castellbisbal, Barcelona



До



Після



ТЕХНОЛОГІЯ	BINARY SYSTEM
КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР	3
ОПИС	Гематома, спричинена випотом після видалення катетера. Сеанс 1 і 2. Ємнісний, 10 хвилин при 5%. Резистивний, 10 хвилин при 5%. Сеанс 3. Ємнісний, 10 хвилин при 7% (область гематоми, внутрішня частина плеча). Резистивний, 10 хвилин при 7% (область гематоми, внутрішня частина плеча). Ємнісний, 10 хвилин при 7% (область гематоми, зовнішня частина плеча). Резистивний, 10 хвилин при 7% (область гематоми, зовнішня частина плеча)
ПРОВОДИВ	Sikeops Estetica, Manresa, Barcelona

АДРЕСА ТА ТЕЛЕФОНИ ПРЕДСТАВНИКА

Вже понад 20 років компанія **Vlarus** входить до числа найбільших імпортерів високоякісного обладнання для клінік естетичної медицини,

масажних і SPA-комплексів, салонів краси та процедурних косметологічних кабінетів.

Адреса і телефони компанії Vlarus:

Купити в Україні	Офіційний дистриб'ютор в Україні КОМПАНІЯ ТОВ «ВЛАРУС» 📍 03150, Київ, Україна, вул. Велика Васильківська, 65, оф. 212 ☎ +38 067 294 29 47 🌐 www.vlarus.info ✉ info@vlarus.info
Купити в Казахстані	Телефон представника у Казахстані: ☎ +77786201916
Купити в інших країнах: Грузія, Таджикистан, Вірменія, Туркменістан, Узбекистан, Киргизстан	Замовлення можна зробити за телефонами: ☎ +380672942947 ☎ +77786201916